



Uw groothandel in
paramedisch
materiaal

Voeding via een alternatieve weg



Inhoudstafel

Gohy

Overzicht sondes

Materiaal

Veiligheid

De verschillende sondes in het gamma

Spuitjes

Verstopping

Reiniging

Quiz





- ✓ Gohy is een familiebedrijf dat al meer dan 40 jaar met passie actief is in de distributie van paramedisch materiaal. Het groeide uit tot een betrouwbare partner binnen de zorgsector. Met een vestiging in Andrimont (Dison) en Ronse.



- ✓ Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van hygiëne, comfort, voeding en zorg voor incontinentie.
- ✓ Wij bieden ook meubels aan die aangepast zijn aan senioren en zorginstellingen.

De firma Gohy heet u welkom !

Onze firma, die 30 jaar geleden werd opgericht, is gespecialiseerd in het domein van de hygiëne, het comfort en de verzorging van incontinentie-patiënten.

Wij verdelen eveneens een uitgebreid gamma meubilering, specifiek aangepast aan senioren, evenals aan verzorgingsinstellingen.

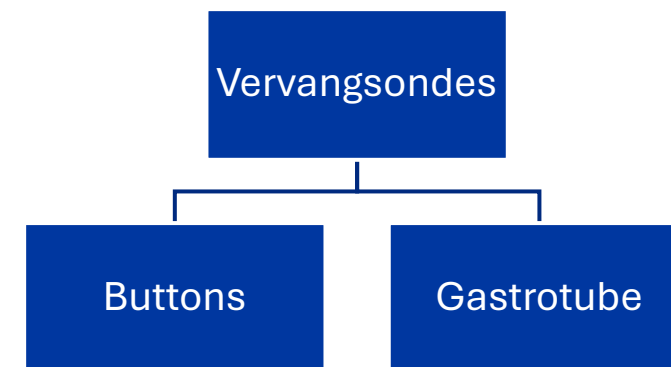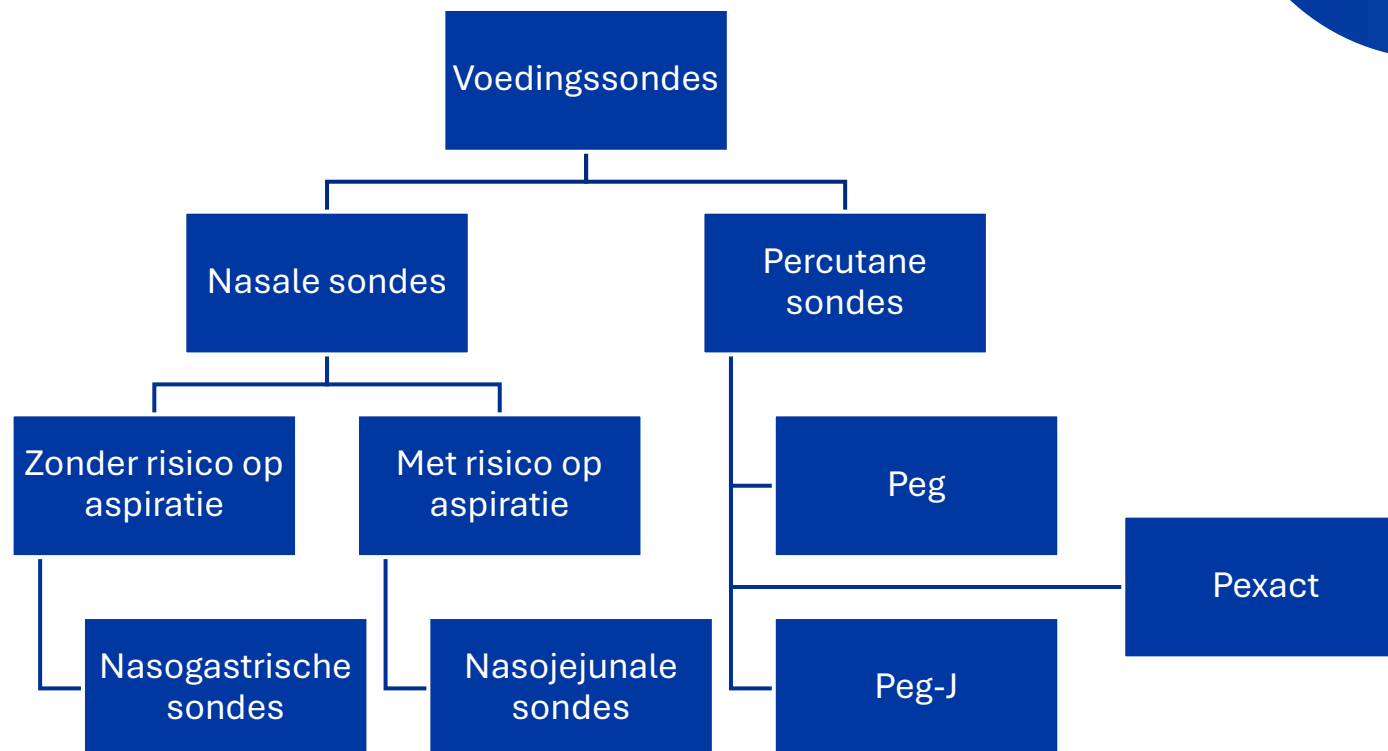

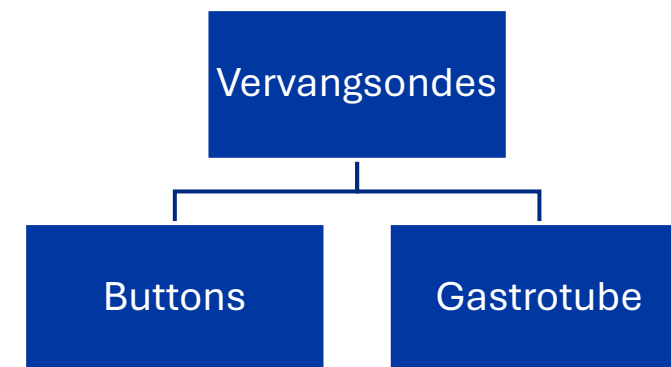
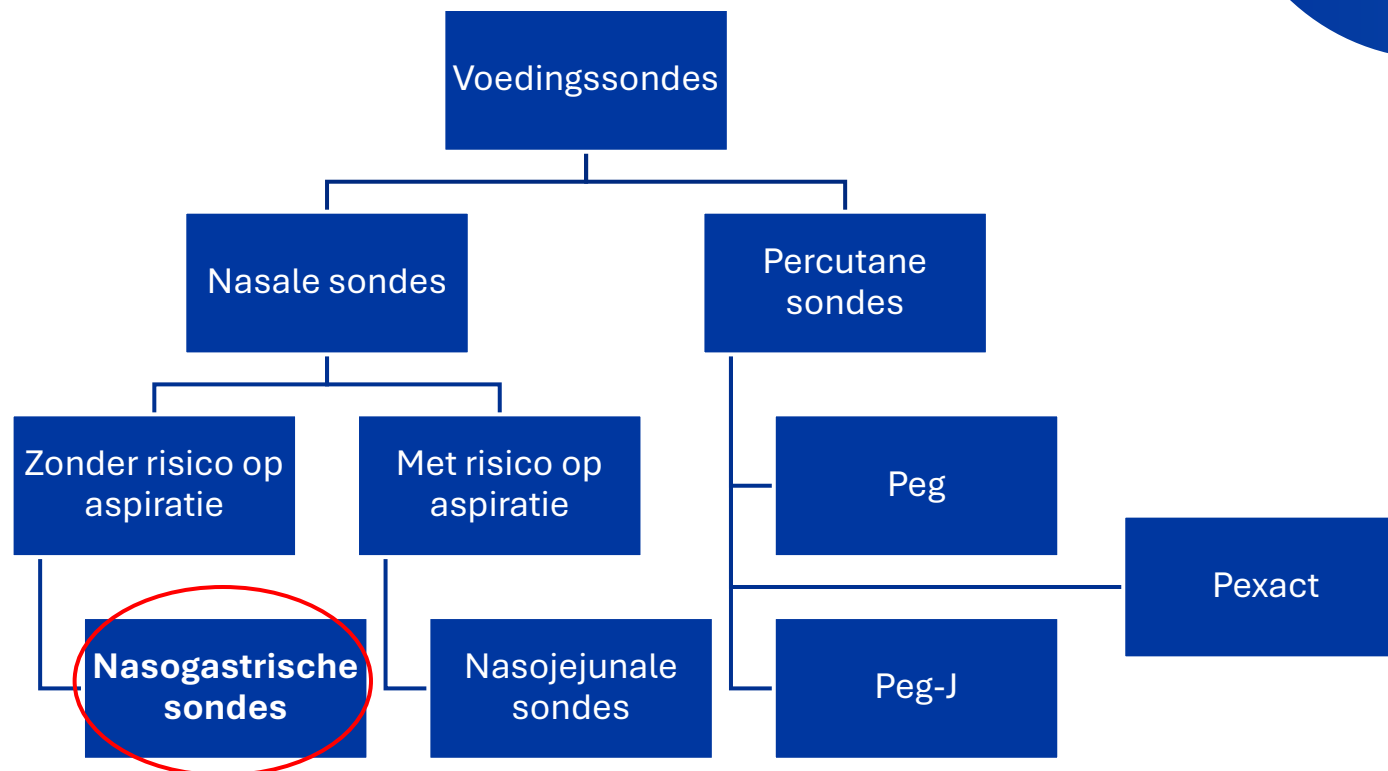




Nasogastrische sondes

Product Name	Size (FR)	Length (cm)	Stylet
Compat® Soft Junior 5FR 50 cm	5	50	No
Compat® Soft Junior 6FR 90 cm	6	90	No
Compat® Soft Junior 6FR 90 cm S			Yes
Compat® Soft 8FR 120 cm	8	120	No
Compat® Soft 8FR 120 cm S			Yes
Compat® Soft 10FR 120 cm	10	120	No
Compat® Soft 10FR 120 cm S			Yes
Compat® Soft 12FR 120 cm	12	120	No
Compat® Soft 12FR 120 cm S			Yes
Compat® Soft 14FR 120 cm	14	120	No
Compat® Soft 14FR 120 cm S			Yes



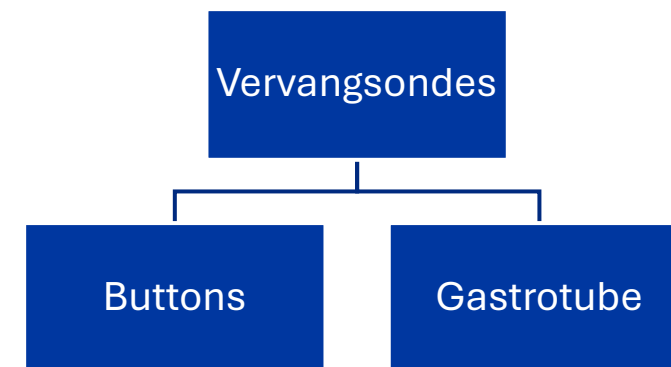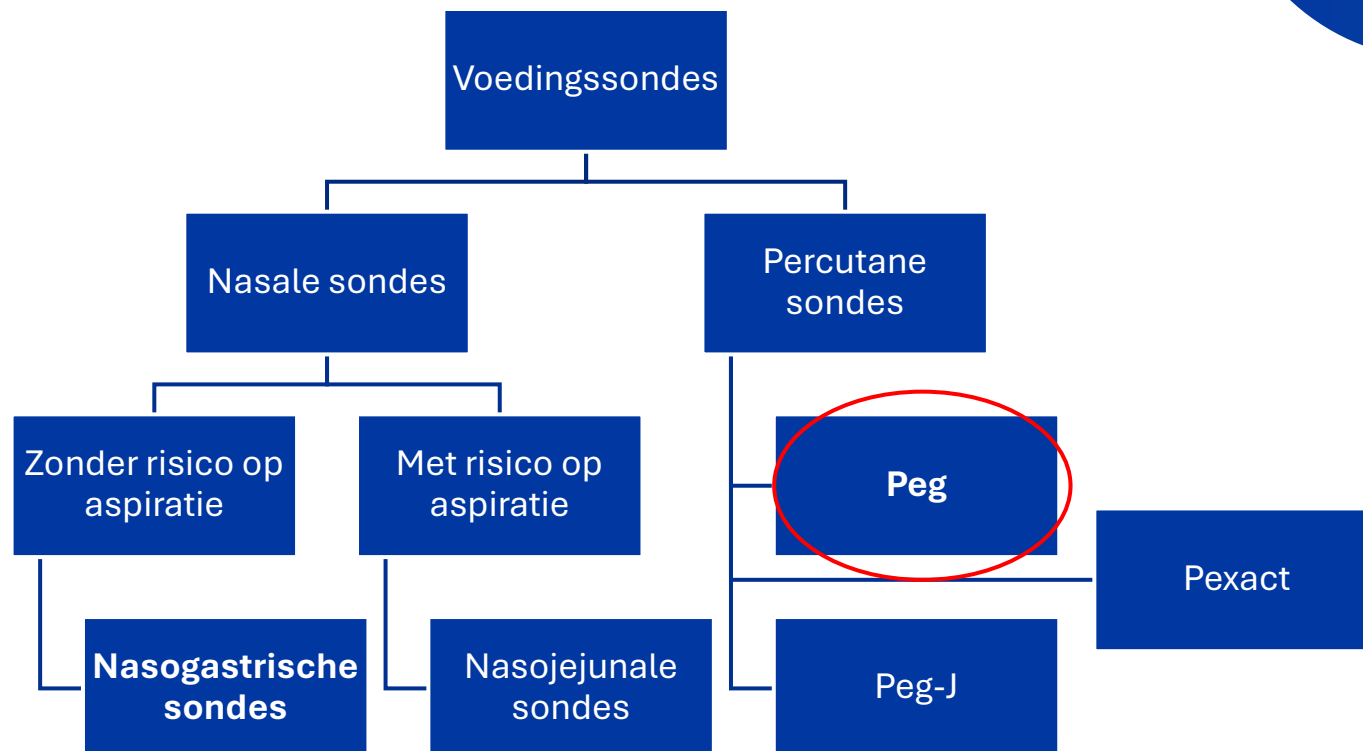



PEG sondes

Sonde van Fresenius Kabi, ook andere merken beschikken over dit type sonde

Percutane sonde geplaatst in het ziekenhuis

Aanbod (met kleurcodes):

- CH12
- CH14
- CH16
- CH20

→ 3 combinaties van PEG-J mogelijk:

- CH9/16
- CH9/20
- CH12/20





Algemene adviezen

Verzorging

De eerste week na plaatsing;

- Niet draaien of dompelen
- Het fixatie plaatje moet tegen de huid liggen
- De opening dagelijks controleren en reinigen met NaCl of steriel water

Vanaf 1 week na plaatsing;

- De huid rond de opening dagelijks reinigen met water (eventueel met zeep)
- Sonde dompelen, niet draaien





Algemene adviezen

Spoelen

- Met 30 ml water.
- Vóór en ná elke toediening van sondevoeding of van een geneesmiddel.
- Bij voeding in bolus: vóór en ná elke toediening.
- Bij continue voeding: elke 4 uur

Geneesmiddelen

- Medicatie nooit mengen met sondevoeding.
- Geef de voorkeur aan medicatie in vloeibare vorm.

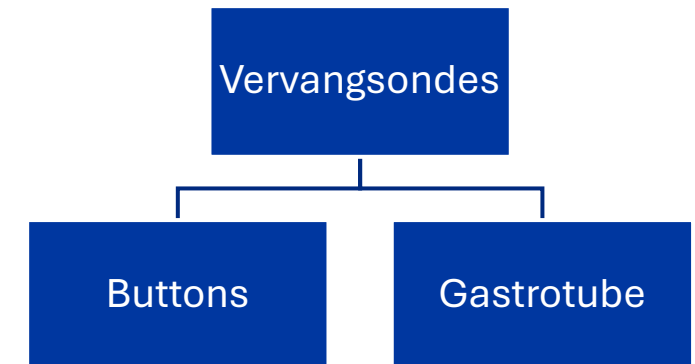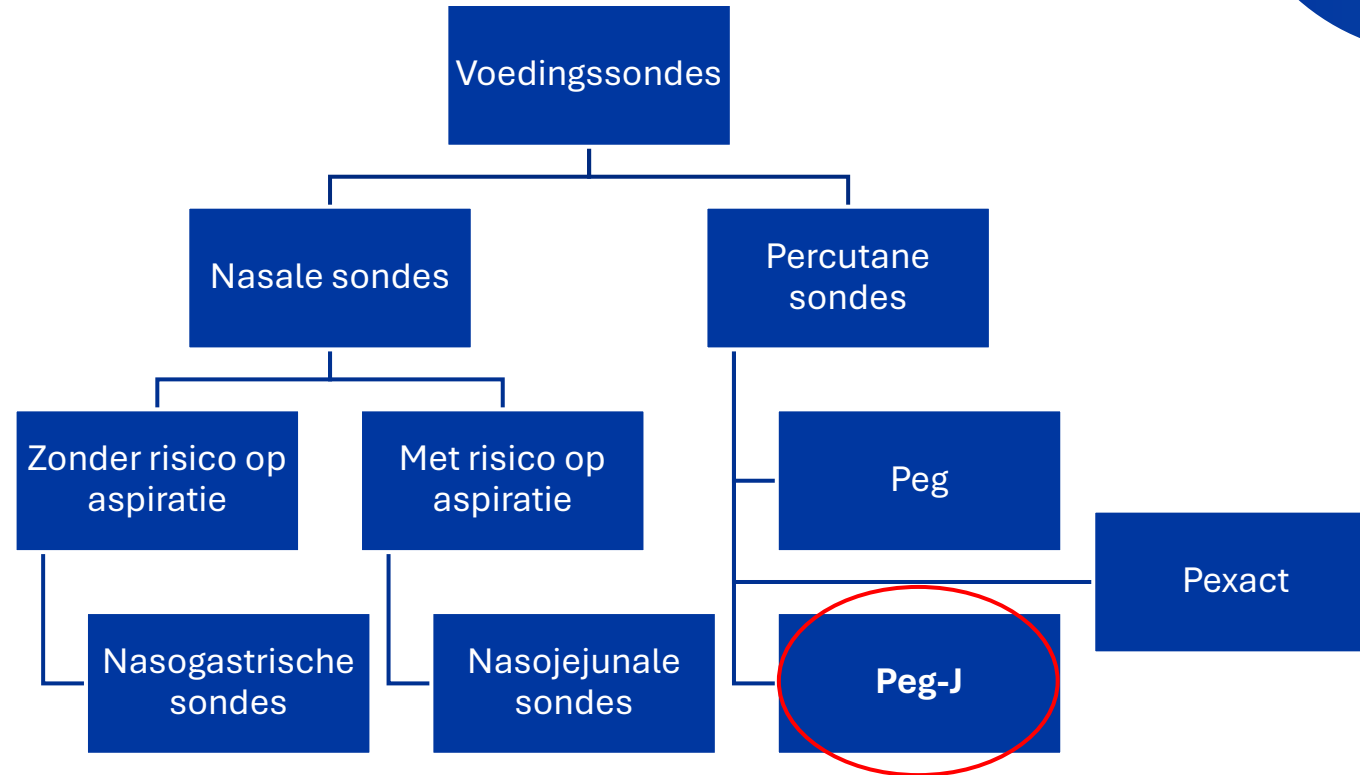






PEG-J sondes

Duidelijke indicatie

- “g” voor gastrische toegang
- “i” voor intestinale toegang

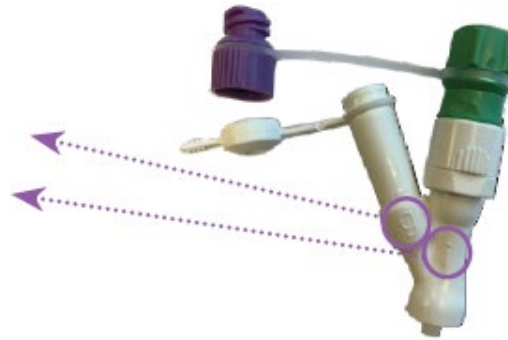

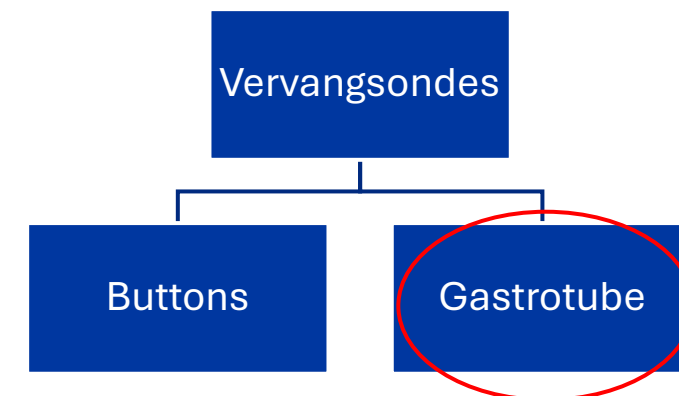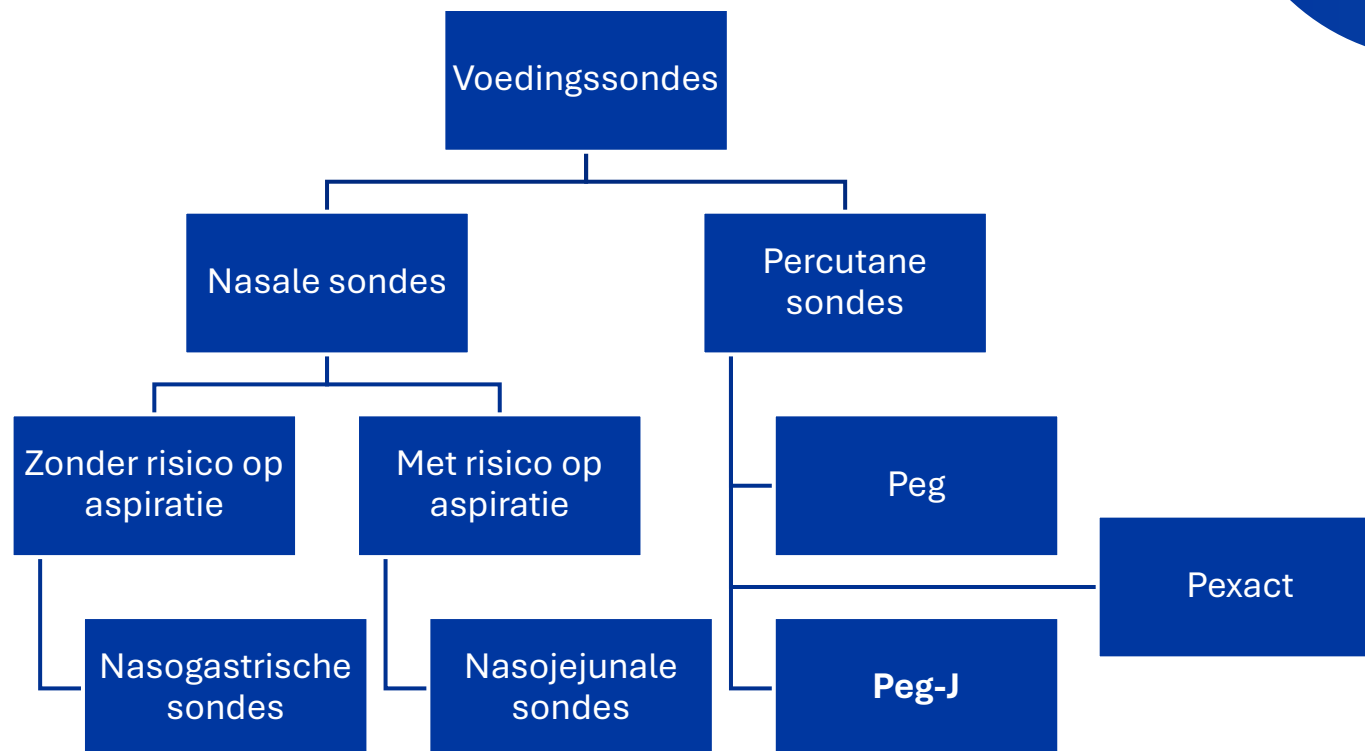

Vervanggastrostomie

Voor de vervanging van een sonde in een volledig gevormd/genezen stoma: de initiële sonde (bvb: PEG) moet min. 4 weken eerder geplaatst zijn geweest

- ✓ ENFit connector
- ✓ Kleurcode afhv CH
- ✓ CH staat vermeld op de sonde
- ✓ Vulvolume ballon aangeduid



Product Name	Valve Color	Balloon Size	Nominal Outer Size	Size	Length
Compat® Gastrotube 12 FR		5 cc	Ø 4.0	12 FR	± 255 mm
Compat® Gastrotube 14 FR		5 cc	Ø 4.7	14 FR	± 255 mm
Compat® Gastrotube 16 FR		10 cc	Ø 5.3	16 FR	± 255 mm
Compat® Gastrotube 18 FR		15 cc	Ø 6.0	18 FR	± 255 mm
Compat® Gastrotube 20 FR		15 cc	Ø 6.7	20 FR	± 255 mm
Compat® Gastrotube 22 FR		15 cc	Ø 7.3	22 FR	± 255 mm
Compat® Gastrotube 24 FR		15 cc	Ø 8.0	24 FR	± 255 mm



Algemene adviezen

Algemene adviezen zoals bij PEG sonde

Frequentie vervanging: elke 3-4 maand

Controleren van het vulvolume (1x per week)



- Haal het water uit de ballon met het bijgeleverde spuitje
- Controleer het vulvolume
- Verwijder het water
- Vul de ballon opnieuw met de aangegeven hoeveelheid steriel water



Algemene adviezen

Instructies om de sonde dagelijks te dompelen:

- Het plaatje losmaken en deze 5 cm naar achter schuiven.
- Nadien de sonde 2 tot 10 cm naar binnen schuiven.
- Trek de sonde weer op totdat een lichte weerstand wordt gevoeld.
- Plaatje terug richting de buik te duwen.
- Zorg voor een speling van 0,5 tot 1 cm tussen het plaatje en de buik.
- Monteer het plaatje.

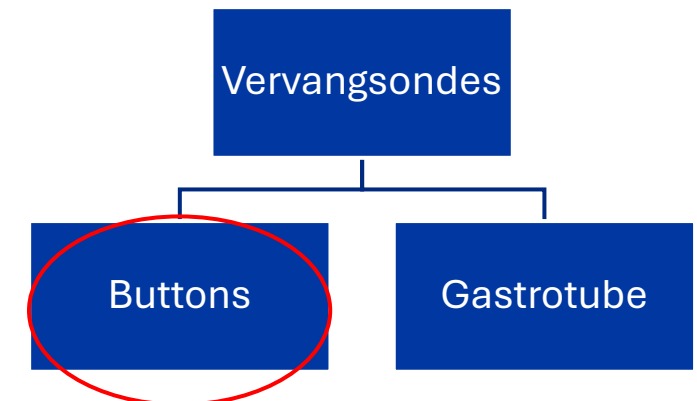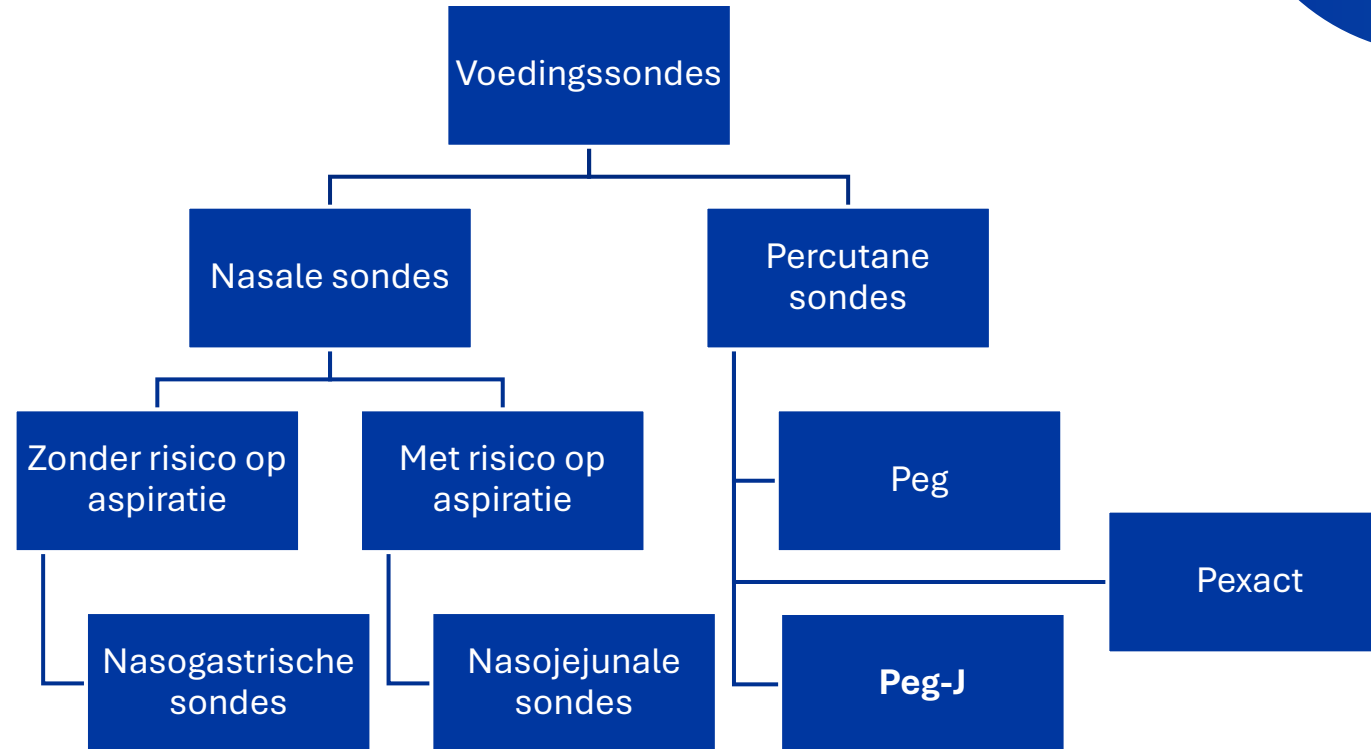



Vervanggastrostomie

Voor de vervanging van een sonde in een volledig gevormd/genezen stoma: de initiële sonde (bvb: PEG) moet min. 4 weken eerder geplaatst zijn geweest

Verpakking per stuk verkrijgbaar

Controleren van het vulvolume (1x per week)

- Haal het water uit de ballon met het bijgeleverde spuitje
- Controleer het vulvolume
- Verwijder het water
- Vul de ballon opnieuw met de aangegeven hoeveelheid steriel water





Vervanggastrostomie

Inhoud van een set:

- Compat Buddy Button
- 2 ENFit extension sets
- 35 ml ENFit spuit
- 10 ml Luer spuit
- Stylet
- Wateroplosbaar glijmiddel
- 2 gaascompressen





Accessoires

Verlengstuk om de connectie te kunnen maken tussen de buttonsonde en de toedieningsset of een ENFit spuit


2 mogelijkheden:

Connector met een 90° hoek

Connector zonder 90° hoek

Per stuk steriel verpakt

10 stuks per doos

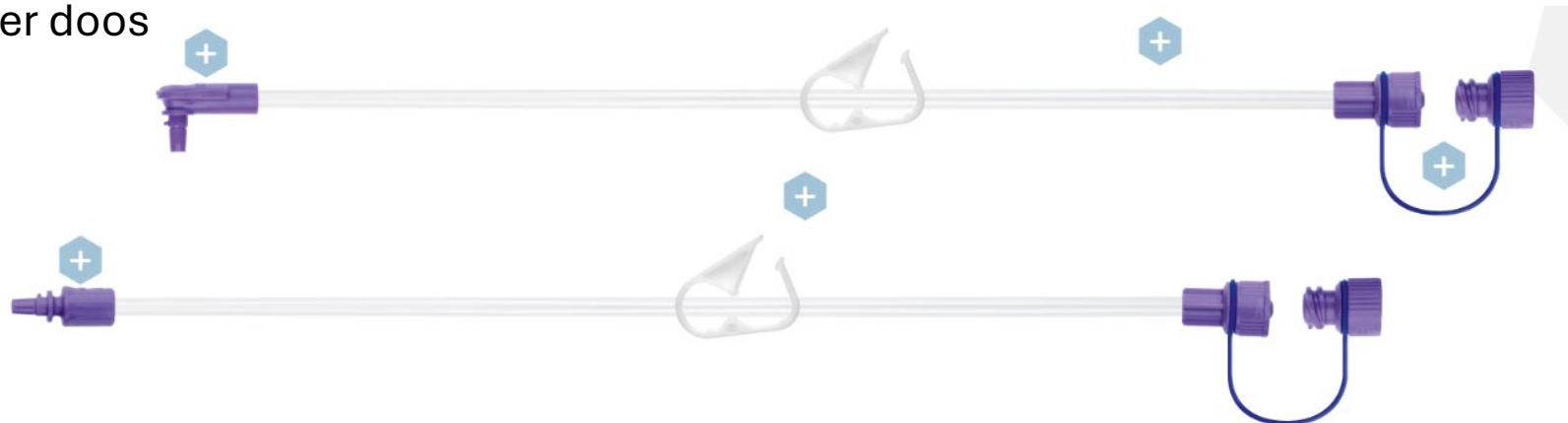



Accessoires

Meetinstrument om de lengte van het stomakanaal te meten

De lengtemeter kan over een voeddraad worden geschoven





Per stuk verkrijgbaar en steriel verpakt:

1ml - 3ml - 5ml - 10ml - 20ml - 30ml - 60ml

100ml → voeding in bolus





Algemene adviezen

Als een sonde verstopt geraakt, dan kan je volgende stappen doorlopen:

- 1) Doorspoelen met een ENFit spuit met lucht (10 ml)
- 2) Doorspoelen met lauw water.
- 3) Inbrengen van 30ml bicarbonaatoplossing 5%. Een aantal minuten laten weken en proberen door te spuiten met lucht. Eventueel een aantal keren herhalen.
- 4) Inbrengen van acetylcysteïne oplossing (= 1 bruistablet acetylcysteïne oplossing)



Reinigen van de sonde en het stomagebied

- 1) Sluit de klem (indien aanwezig) en open de fixatieplaat
- 3) Maak de sonde los en haal hem uit de fixatieplaat
- 4) Verwijder de fixatieplaat van de huid
- 5) Maak de huid en fixatieplaat schoon. Daarna goed drogen.
- 6) De sonde tussen duim en wijsvinger vastpakken en 2-3cm naar binnen duwen. Daarna de sonde weer in de uitgangspositie brengen.
- 7) Terugplaatsen van de fixatieplaat
- 8) Bevestig de sonde weer in de fixatieplaat en sluit de plaat.
- 9) De fixatieplaat moet niet te strak op de huid zitten, want anders kan een druknecrose ontstaan.



Nu is het aan jullie

Mag ik medicatie toevoegen aan de sondevoeding van de bewoner?

- 1) Ja
- 2) Nee



Nu is het aan jullie

Mag ik medicatie toevoegen aan de sondevoeding van de bewoner?

1) Ja

2) **Nee**



Nu is het aan jullie

De grootte van een sonde wordt uitgedrukt in Fr (Charrière). Wat betekent dit?

1. De lengte van de sonde in cm
2. De diameter van de sonde in mm
3. De inhoud van de sonde in ml



Nu is het aan jullie

De grootte van een sonde wordt uitgedrukt in Fr (Charrière). Wat betekent dit?

1. De lengte van de sonde in cm
2. **De diameter van de sonde in mm**
3. De inhoud van de sonde in ml



Nu is het aan jullie

Welk van volgende stellingen is correct tijdens de dagelijkse verzorging van een PEG-sonde?

1. De sonde draaien om verkleving te voorkomen
2. De sonde dompelen zonder te draaien
3. De sonde zowel draaien als dompelen



Nu is het aan jullie

Welk van volgende stellingen is correct tijdens de dagelijkse verzorging van een PEG-sonde?

- 1. De sonde draaien om verkleving te voorkomen
- 2. De sonde dompelen zonder te draaien**
- 3. De sonde zowel draaien als dompelen



Uw groothandel in
paramedisch
materiaal

Vragen?