

SimpLink

Méthode par bolus

Le système unique pour l'alimentation en bolus

- ✓ Facile
- ✓ Convivial
- ✓ Hygiénique

Connectez
& alimentez

UN MANUEL
PRATIQUE



SimpLink™

Conçu pour les patients et les soignants



L'alimentation en bolus est une méthode **d'alimentation par sonde**. Jusqu'à présent, l'alimentation par sonde était administrée au moyen d'une seringue, de la gravité ou d'une pompe d'alimentation. La pratique quotidienne de l'alimentation en bolus s'est considérablement développée au fil des années afin de répondre à **l'évolution des besoins et des préférences de chaque patient**. C'est pourquoi nous avons conçu le nouveau système d'alimentation par sonde en bolus : **SimpLink™**.

Une alimentation par sonde qui est à la fois hygiénique, rapide et facile à administrer ? C'est possible grâce à SimpLink™

- ✓ Une similitude aux habitudes alimentaires journalières
- ✓ Moins d'impact psychologique
- ✓ Une bonne tolérance
- ✓ Une flexibilité d'utilisation
- ✓ Une rapidité d'alimentation
- ✓ Plus de liberté de mouvement et d'action
- ✓ Une meilleure qualité de vie générale

MATÉRIEL NÉCESSAIRE



L'alimentation par sonde prescrite



Si nécessaire, un tuyau/un kit de prolongation avec connecteur



De l'eau pour rincer la sonde
(le volume recommandé par le professionnel de santé)



Une seringue* pour rincer la sonde alimentaire.

** disponible en seringues de 10ml, 20ml ou 60ml*

LA PRÉPARATION



Lavez-vous les mains avant et après tout contact avec la sonde d'alimentation.



Avant de l'utiliser, **vérifiez** l'étiquette et la date d'expiration de l'alimentation par sonde.




Assurez-vous que le patient/client est **assis ou allongé, la tête relevée** d'au moins 30 degrés (cette hauteur correspond à environ deux oreillers) et qu'il maintient cette position pendant 30 à 60 minutes après chaque alimentation pour prévenir les nausées ou le reflux.

SimpLink™

Alimentation par sonde en
bolus dans récipient
SmartFlex™ de 250 mL.

COMMENCEZ L'ALIMENTATION

1

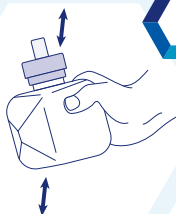


Secouez doucement le récipient avant de l'ouvrir

2



Dévissez le grand bouchon violet, retirez le film de protection et refermez le flacon avec le bouchon violet, retirez ensuite le petit bouchon transparent.

3

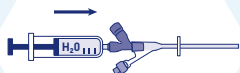

Rincez la sonde d'alimentation avec de l'eau.

CONSEILS D'UTILISATION



Tenez le flacon plus haut que l'emplacement de la stomie




D'abord, compressez le centre du flacon




Puis, compressez de haut en bas

Poussez doucement.
Prenez votre temps

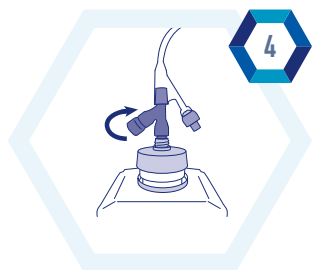


Connectez l'alimentation par sonde SimpLink™ à l'extrémité de la sonde d'alimentation (ou au connecteur du tuyau de prolongation) et ouvrez la valve si celle-ci est présente

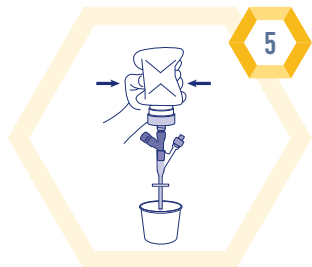


Appuyez sur le récipient SimpLink™ et administrez l'alimentation.

L'administration de chaque flacon prend en moyenne 10 à 20 minutes (en fonction de la condition du patient/client).

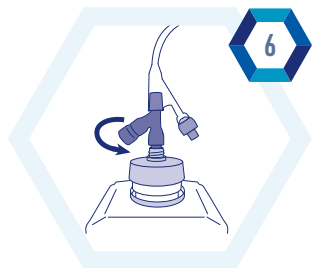

Si présente, fermez la valve de la sonde d'alimentation avant de retirer le récipient SimpLink™

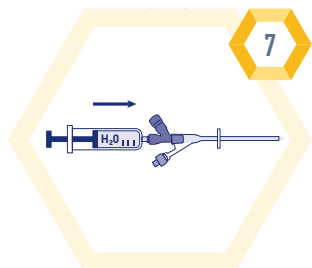

Rincez la sonde d'alimentation à l'eau. Remettez le petit bouchon à l'extrémité de la sonde d'alimentation.

SUIVI



Assurez-vous que le patient/client est **assis ou allongé, la tête relevée** d'au moins 30 degrés (cette hauteur correspond à environ deux oreillers) et qu'il maintient cette position pendant 30 à 60 minutes après chaque alimentation pour prévenir les nausées ou le reflux.

Refermez le reste de l'alimentation et conservez-le au froid.
Suivez les instructions d'utilisation mentionnées sur l'emballage

Simplink

Méthode par bolus

CONÇU POUR
LES PATIENTS ET
LES SOIGNANTS

Connectez &
alimentez





INNOVANT

Méthode unique pour administrer l'alimentation par sonde en bolus



FACILE À UTILISER

Le récipient Smartflex™ flexible et ergonomique permet une administration aisée



MOBILITÉ

Facile à emporter et à utiliser partout, y compris à l'extérieur



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ*

Un raccord ENFit pour une connexion directe et sécurisée à la sonde d'alimentation réduisant le risque de contamination par rapport à l'alimentation en bolus par seringue



GAIN DE TEMP*

Moins de manipulations (par rapport à l'administration du bolus par seringue) grâce à la possibilité de connexion directe



QUALITÉ DE VIE

Une plus grande indépendance et liberté dans vos activités quotidiennes*

*Rétroaction obtenue de l'étude menée parmi des soignants en Scandinavie, 2020. Data on file



DISPONIBLE DANS LES VARIÉTÉS



COMPLEAT®



ISOSOURCE®
PROTEIN FIBRE

Aliments destinés à des fins médicales spéciales,
à utiliser sous surveillance médicale

Nestlé Health Science, Rue de Birmingham 221, 1070 Bruxelles
Tél. : 02 529 52 30 • www.NestleHealthScience.be

Information et
vidéo d'instructions SimpLink™

